

ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия

Наименование: «Жгут кровоостанавливающий «Эндофарм» по ТУ 32.50.13-017-40393587-2022» (далее - жгут).

Назначение: для временной остановки кровотечения, вызванного повреждением сосудов конечностей.

Основные функциональные элементы:

ремень для фиксации ручки для затягивания жгута

дополнительная пряжка

основная пряжка

самоклеящаяся лента

ручка для затягивания жгута

фиксирующий механизм ручки для затягивания жгута

внутренний ремень

Указания по применению

1. Наложите петлю самоклеящейся ленты чуть выше центра раны. Жгут необходимо накладывать между раной и сердцем, максимально близко к ране. Если место наложения жгута приходится на среднюю треть плеча и на нижнюю часть бедра, следует наложить жгут выше.

2. Затяните самоклеящуюся ленту и плотно приклейте ее по всему периметру раненой конечности, не закрывая фиксирующий механизм ручки для затягивания жгута (далее - ручка).

3. Поворачивайте ручку пока кровотечение не остановится.



4. Поместите ручку внутрь фиксирующего механизма и зафиксируйте. Проверьте уровень кровотечения и при необходимости подтяните. Проведите повторную оценку, если обильное кровотечение продолжается.



5. Поместите самоклеящуюся ленту на ручку и внутрь фиксирующего механизма. Закрепите ручку и самоклеящуюся ленту с помощью ремня для фиксации ручки. Запишите время наложения жгута (для этого можно использовать шариковую ручку, которая в зависимости от варианта исполнения медицинского изделия дополнительно может входить в его состав, шариковая ручка размещается в торце ручки для затягивания жгута).



ВНИМАНИЕ: максимальное время наложения жгута не должно превышать 60 минут в теплое время года и 30 минут в холодное. Если максимальное время наложения жгута истекло, а медицинская помощь недоступна, то рану зажимают руками, жгут осторожно распускают на 3-5 минут, затем накладывают вновь.

Если жгут наложен правильно, кровотечение прекращается немедленно, конечность бледнеет. Пульсация сосудов ниже жгута исчезает.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: чрезмерное затягивание жгута может вызвать сдавливание мышц, нервов, сосудов и стать причиной паралича конечности. Слабо наложенный жгут не достигает цели прекращения кровотечения.

Потенциальные потребители медицинского изделия: медицинский персонал и пациенты, лица с венозным или артериальным кровотечением.

Показания к применению: первая помощь при сильном венозном или артериальном кровотечении, травматический отрыв конечности, укусы змеи, компрессионное сдавливание конечности продолжительное (или неизвестное) время.

Противопоказания к применению:

1. Запрещено накладывать жгут, если в местах кровотечения наблюдается воспаление тканей (может привести к распространению инфекции и летальному исходу);
2. Нагноительный процесс на месте или вблизи места наложения жгута;
3. Открытый перелом конечности или открытая рана в области наложения жгута;
4. Резко выраженный атеросклероз (ведёт к переполнению вен и при наличии в них тромбов – к тромбозамболии).

Примечание: оценив риск угрозы жизни пострадавшего, врач может принять решение о наложении жгута, не смотря на вышеперечисленные противопоказания.

Побочные эффекты:

1. Размозжение мышц, повреждение нервов, сосудов и паралич конечности при излишне сильном затягивании жгута;
2. Тромбозы и эмболии;
3. Продолжительное сдавливание конечности жгутом может привести к омертвлению конечности;
4. Наложение жгута на среднюю треть плеча, может привести к травмированию лучевого нерва.

Область применения: стационарные, амбулаторные лечебно-профилактические учреждения, полевые условия, в быту, службы скорой медицинской помощи, экстренные медицинские службы, военная и экстремальная медицина, мобильные спасательные формирования.

Срок годности: 5 лет.

Хранение: хранить в хорошо проветриваемом закрытом помещении, на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от +5 до +40 °С и при относительной влажности не более 80 %.

Транспортирование: изделие можно транспортировать с помощью всех видов крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и при относительной влажности не более 80 %.

Графические символы, используемые для нанесения на маркировку:

| Символ | Значение |
|---|--|
|  | Изготовитель |
|  | Дата изготовления |
|  | Код партии |
|  | Обратитесь к инструкции по применению |
|  | Запрет на повторное применение |
|  | Использовать до |
|  | Не стерильно |
|  | Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению |

Производитель:

ФГУП «Московский эндокринный завод»
Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endopharm.ru>

Организация для принятия претензий от потребителей:

ФГУП «Московский эндокринный завод»
Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endopharm.ru>
e-mail: mez@endopharm.ru